

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE
CON USO DE ALINEADORES DENTALES INVISIBLEN**

Este formulario debe ser firmado por el odontólogo o especialista que prescribe el uso de “ALINEADORES DENTALES INVISIBLEN®” antes de comenzar el tratamiento, deberá conservarlo como parte de sus registros y deberá ser enviado a DRD DIAGNÓSTICO 3D® firmado.


VENTAJAS DE INVISIBLE®

- Los alineadores Invisiblen ofrecen una alternativa estética sustituyendo los brackets convencionales y sus complicaciones.
- Los planes de tratamiento se pueden visualizar con ayuda del SET-UP virtual.
- Reduce las horas de sillón-paciente.
- Reduce inventarios de prescripciones convencionales.

RIESGOS E INCOMODIDADES DE INVISIBLEN®

Al igual que con otros tratamientos ortodóncicos, el uso de los alineadores dentales puede conllevar algunos de los riesgos indicados a continuación:

- 1.** No utilizar los alineadores el número de horas diarias indicadas, no cumplir con las citas programadas, y la existencia de dientes en erupción o anomalías de número y forma pueden prolongar la duración del tratamiento y los resultados esperados.
- 2.** Podría presentarse sensibilidad dental después de cambiar cada alineador.
- 3.** Las encías, mejillas o labios pueden ser lacerados o irritados por los productos.
- 4.** Los dientes pueden cambiar de posición (recidivar) después del tratamiento. El uso constante de retenedores al final del tratamiento reduce esta tendencia.
- 5.** Consumir alimentos y bebidas que contienen azúcar, no lavarse los dientes, no utilizar el hilo dental correctamente antes de colocarse los alineadores puede exponer a los pacientes a riesgos de caries e inflamación de las encías.
- 6.** Al igual que con otros dispositivos ortodóncicos, los alineadores pueden afectar la pronunciación de algunas palabras.
- 7.** El uso de los alineadores puede provocar incremento temporal de la saliva ó resequedad en la boca y puede agravarse con la ingesta de ciertos medicamentos.
- 8.** Durante el tratamiento se podrán pegar aditamentos temporales a uno o más dientes para facilitar el movimiento dental y/o la retención del alineador.
- 9.** Los dientes pueden necesitar desgaste interproximal o un leve toque en su forma para crear el espacio necesario para que se produzca el alineamiento dental;
- 10.** La oclusión puede cambiar durante el transcurso del tratamiento, pudiendo causar molestias temporales en el paciente;

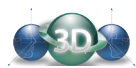

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE CON USO DE ALINEADORES DENTALES INVISIBLEN (CONTINÚA).

11. Es posible que la oclusión necesite ajuste oclusal al finalizar el tratamiento.
12. Es posible que para planes de tratamiento complejos se requieran tratamientos ortodóncicos suplementarios, tales como la utilización de botones cementados, elásticos ortodóncicos, dispositivos de anclaje temporal, entre otros.
13. Arcadas con apiñamiento severo durante largos períodos de tiempo pueden carecer de tejido gingival debajo del contacto interproximal donde se alinea la arcada dental, presentando un espacio con forma de “triángulo negro”.
14. Los Alineadores no son efectivos para el movimiento de implantes dentales.
15. Las condiciones médicas generales y la utilización de medicamentos pueden afectar el tratamiento ortodóncico.
16. Se puede necesitar cirugía oral para corregir apiñamientos severos o discrepancias óseas antes de la colocación de los alineadores, deberán considerarse los riesgos asociados a la anestesia y el proceso cicatrización.
17. Un diente previamente impactado o sometido a una restauración significativa puede resultar gravemente afectado. En casos excepcionales, la vida útil del diente puede verse reducida, pudiendo ello justificar un tratamiento dental adicional, como endodoncia, restauración adicional o extracción.
18. Las restauraciones dentales existentes (por ejemplo, coronas) pueden verse desplazadas y requerir una nueva cementación o en algunos casos la sustitución.
19. Las coronas clínicas cortas pueden generar problemas de retención de los alineadores y pueden inhibir el movimiento dental.
20. El tratamiento con alineadores invisibles puede acortar la longitud de las raíces de los dientes con igual riesgo que en un tratamiento convencional de brackets.
21. Los pacientes que presentan apiñamiento grave y/o varias piezas ausentes están más expuestos a la fractura de los alineadores.
22. En casos excepcionales podrá surgir sintomatología de disfunción de la articulación temporo-mandibular.
23. Pueden presentarse reacciones alérgicas a los componentes de los alineadores.
24. Los dientes que no estén erupcionados o considerados dentro de los alineadores pueden presentar sobre-erupción.

DRD DIAGNÓSTICO 3D®, sus vendedores, sucesores, cesionarios y representantes no tienen relación alguna con el resultado del tratamiento autorizado previamente por el especialista. Una copia de este consentimiento será considerada como efectiva y válida como un original. He leído, entiendo y acepto los términos establecidos en este consentimiento con mi firma en este documento.

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA: _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA: _____

TESTIGO: _____

